

# Ernie 2

Ventrale stavoorziening





## **Geachte cliënte, geachte cliënt,**

Wij willen u hartelijk danken voor het vertrouwen en de aanschaf van ons product.

Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Gelieve er rekening mee te houden dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing omwille van de uitrusting van uw product kunnen afwijken.

Technische wijzigingen behouden wij ons voor.

### **Belangrijke informatie!**

Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

## **Uw Schuchmann team**

# Inhoud

<b>1. Voorbereiding van de ventrale stavoorziening voor gebruik</b> .....	<b>4</b>
1.1 Uitlevering.....	4
1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik.....	4
1.3 Veilig verwijderen.....	4
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing.....	4
<b>2. Productbeschrijving</b> .....	<b>5</b>
2.1 Materiaalinformatie.....	5
2.2 Transport en verplaatsen.....	5
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften.....	6
2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwinginstructies.....	7
2.5 Uitrusting basismodel.....	7
2.5.1 Uitrusting volgens HMV.....	7
2.6 Lijst met toebehoren.....	8
2.7 Productoverzicht.....	8
2.8 Algemene instellingen.....	9
2.9 In-en uitstappen.....	10
<b>3. Instellingen</b> .....	<b>11</b>
3.1 Kanteling van de middelste kolom.....	11
3.2 Hoogteverstelling aan de middelste kolom.....	11
3.3 Voetplaat.....	12
3.4 Gedeelde voetplaat.....	12
3.5 Hielranden.....	13
3.6 Voetriempjes.....	13
3.7 Kniesteunen.....	13
3.8 Bekkenframe.....	14
3.9 Gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken.....	15
3.10 Bilsteun.....	16
3.11 Buik-bekkensteun.....	16
3.12 Borststeun met romp ondersteuning.....	17
3.13 Rugband.....	17
3.14 Rugsteun.....	18
3.15 Hoofdsteun.....	18
3.16 Werkblad.....	19
3.16.1 Werkblad met speelkom.....	19
3.16.2 Verstelbare armsteunen.....	20
3.17 Kinsteun.....	20
<b>4. Onderhoud en reinigen</b> .....	<b>21</b>
4.1 Reinigen.....	21
4.2 Onderhoud.....	21
4.3 Reserveonderdelen.....	21
4.4 Gebruiksduur en hergebruik.....	21
<b>5. Technische gegevens</b> .....	<b>22</b>
<b>6. Garantie</b> .....	<b>22</b>
<b>7. Identificatie</b> .....	<b>23</b>
7.1 EG-conformiteitsverklaring.....	23
7.2 Serienummer / Productiedatum.....	24
7.3 Productversie.....	24
7.4 Uitgave van het document.....	24
7.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer.....	24

# 1. Voorbereiding van de ventrale stavoorziening voor gebruik

## 1.1 Uitlevering

Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en onjuistheden te controleren en let op eventuele transportschade.

### **Controleer het product in aanwezigheid van de afleveraar**

Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Gelieve een schriftelijke reclamatie naar de bevoegde dealer te sturen.

## 1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik

Het correcte gebruik van de ventrale stavoorziening vergt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Stoffering kan door zonlicht ontoelaatbaar verhit raken. Dek deze plaatsen af of bescherm het apparaat tegen zonlicht.

## 1.3 Veilig verwijderen

Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuvcontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsaanwijzingen in de punten 1.3.1 en 1.3.2 in acht te nemen.

### 1.3.1 Verpakking

De verpakking van het product dient voor een eventueel later noodzakelijk transport bewaard te worden. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk, het originele verpakingskarton te gebruiken, zodat het product opErnie 2aal verpakt is. Breng de verpakingsmaterialen per soort naar de recycling. Laat de verpakingsmaterialen niet zonder toezicht, omdat zij mogelijke gevarenbronnen zijn.

### 1.3.2 Product

Voer de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling (zie materiaal informatie onder 2.1).

## 1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze in geval van een mogelijk hergebruik bij het product blijft.

## **2. Productbeschrijving**

### **2.1 Materiaalinformatie**

Het basisframe alsmede de afzonderlijke elementen zijn van staal vervaardigd, corrosievrij en gepoedercoat. Alle lichaamsteunen (behalve de kniesteunen) zijn gewatteerd en gestoffeerd. De stoffering bestaat voor 100% uit polyester of polyamide-textielsubstraat en zijn brandvertragend (volgens DIN EN 1021 - 1 + 2)

### **2.2 Transport en verplaatsen**

De ventrale stavoorziening is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van zwenkwielen is voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, zorg er dan voor dat alle bewegende delen vastgezet zijn.

Ga vervolgens met zijn tweeën naast de ventrale stavoorziening staan en pak deze links en rechts aan het frame vast en draag hem naar de gewenste plaats. Voor het transporteren van de ventrale stavoorziening, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (bekkenframe inklappen, hoogte in de laagste stand, etc.).

## 2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

### Indicaties

De ventrale stavoorziening Ernie 2 is ontworpen voor binnen en dient voor sta-training bij een ernstig verminderde sta-functie of geen mogelijkheid tot opstaan, met name als gevolg van:

- Dwarslaesie
- Multiple sclerose in een vergevorderd stadium
- Hersenverlamming
- Spierdystrofie
- ect.

### Contra-indicaties

Over het algemeen dient de indicatie van het staan medisch-orthopedisch begeleid te worden. Daarom dient in dit verband voor de zorg helder te zijn of er contra-indicaties bestaan ten aanzien van de patiënt. Over het algemeen is elke soort pijn een contra-indicatie. Ook dient er geen sta-training aangeboden te worden, zonder dat in het voortraject duidelijk geworden is dat er bij de patiënt sprake is van een behoorlijke voetvervorming.

Afhankelijk van ziektebeeld en therapie moet het helder gemaakt worden hoe lang de gebruiker in de ventrale stavoorziening mag doorbrengen. In enkele gevallen kunnen de volgende symptomen optreden:

- Problemen met de bloedsomloop
- Beenpijn en rugpijn
- Spastische aanvallen

Ook dient helder te zijn of de gebruiker in een volledig uitgestrekte houding gebracht kan worden. Bij veel gebruikers is in het begin alleen een gebogen staande houding mogelijk.



**Corrigeer de houding nooit met geweld of sterke druk!**

## 2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwingeninstructies



### LET OP!

- Let erop dat de ventrale stavoorzienting alleen door een kind/jongere wordt gebruikt.
- Laat het kind nooit zonder toezicht in de ventrale stavoorzienting staan.
- Het correcte gebruik van de ventrale stavoorzienting vergt een nauwgezette en zorgvuldige inwerking van de begeleidende persoon.
- De maximum belasting (zie punt 5) mag niet overschreden worden.
- Gebruik de ventrale stavoorzienting niet met defecte, versleten of ontbrekende delen.
- Omwille van de brandveiligheid mag de stavoorzienting niet in de omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron zoals elektrische of gasverwarming worden geplaatst.
- Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van het kind in gevaar brengt.
- Gebruik de ventrale stavoorzienting alleen, als alle componenten correct aangebracht en ingesteld zijn.
- Bij het instellen van de ventrale stavoorzienting bestaat kan op beknellingen of beklemmingen van de ledematen
- Gebruikers die problemen met lezen hebben, moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen, om de omgang met de ventrale stavoorzienting te begrijpen.

## 2.5 Uitrusting basismodel

- Basisframe met in de hoogte verstelbare voetplaat
- Kantelverstelling van de middelste kolom met een gasdrukveer van (-)15° - 30°
- incl. borststeun met romp ondersteuning en bilsteun
- Bekkenframe in hoogte en diepte verstelbaar, bekkenpositie verstelbaar met een spindel
- incl. kniesteun met knieschijfuitsparing, individueel driedimensionaal verstelbaar
- Werkblad met rand
- 4 beremde zwenkwieien (75 mm) met volledige blokkeermogelijkheid

### 2.5.1 Uitrusting volgens HMV

De Ernie 2 ventrale stavoorzienting wordt volgens HMV (Duitse technisch hulpmiddelenregister) uitrusting met hielkanten en voetriempjes.

## 2.6 Lijst met toebehoren

- Borststeun met romp ondersteuning (optioneel hoekverstelbaar)
- Bilsteun
- Buik-bekkensteun
- Bekkengeleidingssteun met bekken ondersteuning
- Gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken
- Rugsteun
- Rugband
- Kniesteunen (optioneel met installatiebeugels)
- Hoofdsteun
- Kinsteun
- Werkblad (met of zonder speelkom / met of zonder armsteunen)
- Voetplaat
- Gedeelte voetplaat
- Hielranden
- Voetriempjes

## 2.7 Productoverzicht


De onderstaande afbeelding dient de benaming van de belangrijkste componenten aan te tonen, alsook de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing terugvindt.





## 2.8 Algemene instellingen

Ernie 2 wordt compleet gemonteerd en in de kleinst mogelijke instellingen geleverd. Voordat de gebruiker in het sta-apparaat wordt geplaatst, moet de ventrale stavoorziening worden ingesteld.

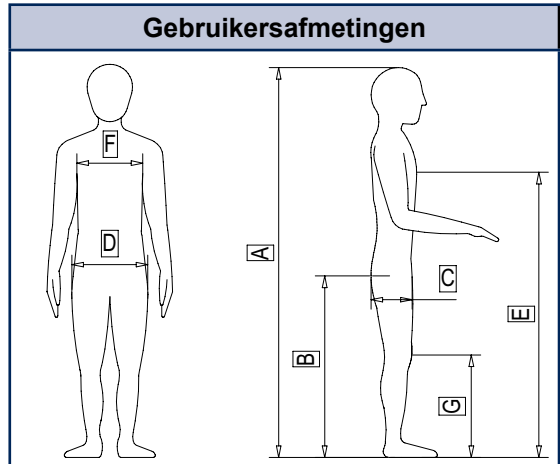

Voor-instellingen			
	Maten nemen van de gebruiker	Instelling aan de stavoorziening doorvoeren	zie
a	Lichaamslengte	Voetplaat tot hoofdsteun	3.2 + 3.15
B	Bekkenhoogte	Voetplaat tot bovenkant van de opname van de bilsteun en vervolgens ca. 5 cm naar beneden instellen.	3.3 + 3.10
C	Bekkendiepte	Diepte van de bilsteun	3.10
D	Bekkenbreedte	Breedte van de gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken	3.9
E	Borstbeenhoogte	Hoogte van de borststeun met romp ondersteuning	3.9
F	Borstbreedte	Breedte van de borststeun met romp ondersteuning	3.12
G	Kniehoogte	Hoogte van de kniesteunen	3.7

## 2.9 In-en uitstappen



Nadat alle voor-instellingen zijn uitgevoerd, zet u vervolgens voor het in- en uitstappen alle vier de zwenkwielen vast (A).

Breng nu de middelste kolom in loodrechte positie (zie punt 3.1) en open de zwenkarm van het bekkenframe (B).

Druk gelijktijdig op de beide veiligheidsknoppen (C+D) om het bekkenframe te openen.

Nu kunt u de gebruiker in de rolstoel / buggy enz. naast de stavoorziening rijden en het betreffende hulpmiddel vastzetten. Til de gebruiker uit de rolstoel / buggy en plaats deze in de stavoorziening en sluit vervolgens het bekkenframe opnieuw.

Nu kunt u de verfijn instellingen van de individuele componenten uitvoeren. Neem hierbij de aanwijzingen voor de instellingen van de betreffende componenten in acht (zie punt 3).

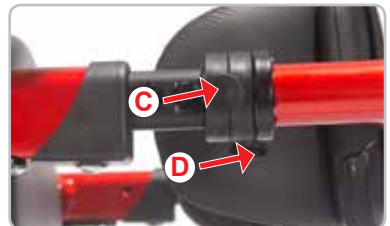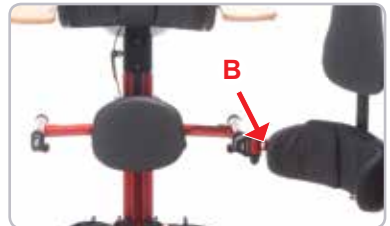

**Het in- en uitstappen mag alleen op een vaste en vlakke ondergrond plaatsvinden.**

### 3. Instellingen

Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

#### 3.1 Kanteling van de middelste kolom

De middelste kolom kan met een gasveer worden veresteld, waarbij het werkblad in de vooraf ingestelde hoek blijft staan. Beveilig de ventrale stavoorziening tegen ongewild wegrollen, gebruik hiervoor de remmen op de betreffende zwenkwielen.




Gebruik voor het instellen van de hoek de drukknopschakelaar (A), die u onder aan het werkblad vindt, breng de middelste kolom in de gewenste positie en laat de drukknopschakelaar weer los.



#### 3.2 Hoogteverstelling aan de middelste kolom

Het zwarte binnenprofiel, dat zich in het bovenste deel van de middelste kolom bevindt, is uittrekbaar en daardoor in hoogte verstelbaar. Om de geleiders in het (C+D) los en brengt u de geleider in de gewenste positie.

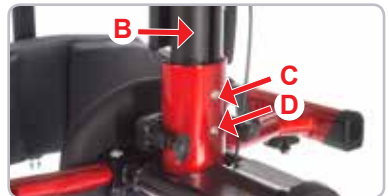

**Houd de geleider daarbij goed vast, omdat deze anders door zijn eigen gewicht in de middelste kolom glijdt.**



**Hoogteverstelling alleen uitvoeren als er zich geen persoon in de ventrale stavoorziening bevindt!**



**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**

### 3.3 Voetplaat

De voetplaat is in hoogte verstelbaar en kan door middel van het binnenprofiel via de hoogteverstelling aan de middelste kolom worden uitgevoerd (zie punt 3.2).


Om de diepte in te stellen, maakt u de kruisopschroeven (A+B), die onder de voetplaat te vinden zijn, los. Breng de voetplaat nu in de gewenste diepte-instelling.




### 3.4 Gedeelde voetplaat

De gedeelde voetplaat is in hoogte en breedte verstelbaar en bovendien hoekverstelbaar voor een spitsvoet-instelling.

Om de gedeelde voetplaat in hoogte in te stellen, draait u de schroeven (C+D) los en brengt u de gedeelte voetplaat in de gewenste positie.

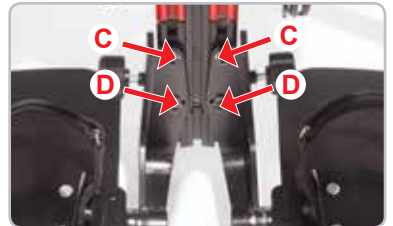

Om de gedeelde voetplaat in de breedte te verstellen, draait u de schroeven (E+F) los en brengt u de gedeelde voetplaat in de gewenste positie.

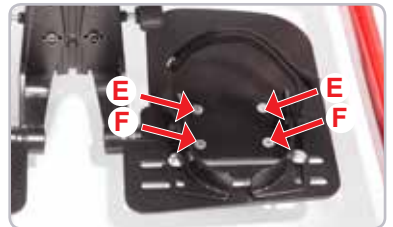

Om de gedeelde voetplaat voor een abductie van de benen in een hoek te verstellen, draait u de schroef (G) los en draait u aan de sterknop (H). Een verdere verstelling van de hoek, bijv. voor spitsvoet-instelling, kan door middel van de inbuschroef (I) worden uitgevoerd. Door middel van het ratelgewricht kan de gehele gedeelde voetplaat in een hoek worden veresteld.




**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**

### 3.5 Hielranden

De hielranden worden op de voetplaat of op de gedeelde voetplaat gemonteerd. Ze kunnen in de breedte of in een hoek worden versteld. De hoogte- of diepte-instelling wordt via de voetplaat of gedeelde voetplaat uitgevoerd, zie punt 3.3 of 3.4

Om de breedte of de hoek in te stellen, draait de vleugelschroeven (A) onder de (gedeelde) voetplaat los en brengt u de hielranden in de gewenste positie.

Daarnaast kunt u de diepte verstellen, door de schroeven (A) los te draaien en deze in het gatpatroon elders te plaatsen.

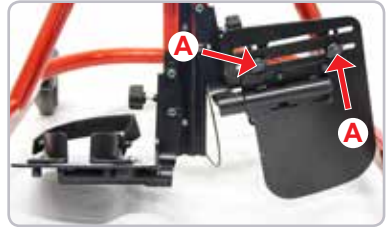

### 3.6 Voetriempjes

De voetriempjes kunnen alleen in combinatie met de hielranden worden gebruikt.

Om de voetriempjes in te stellen, maakt u de klittenbandsluiting los en brengt u de voetriempjes in de juiste positie.




### 3.7 Kniesteunen

De kniesteunen zijn in hoogte, in hoek en in diepte verstelbaar. Bovendien kan de onderlinge afstand afgesteld worden.

Voor het instellen van de hoogte houdt u de kniesteunen vast, draait de vleugelschroeven B los en brengt u de kniesteun in de gewenste positie.

Voor het instellen van de diepte, de hoek en de breedte maakt u de knevel (C) los en brengt u de kniesteun in de gewenste positie.

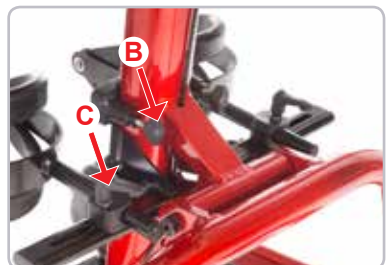

**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**




### 3.8 Bekkenframe

Het bekkenframe kan in hoogte en diepte worden versteld.

Om het bekkenframe in de hoogte te verstellen, draait u de vleugelschroeven (A) los en brengt u het bekkenframe in de gewenste positie.

Het oprichten van de patiënt kan via de spindel (B) worden ingesteld. Bovendien bestaat de mogelijkheid om aan het bekkenframe zelf de diepte te verstellen. Draai hiervoor de schroeven (C) los en trek het achterste gedeelte van het bekkenframe aan beide kanten gelijkmatig uit de diepteverstelling. Zorg ervoor, dat beide binnenbuizen van de diepteverstelling even ver zijn uitgetrokken. Alleen op die manier kan het sluitingsmechanisme van het bekkenframe op een soepele manier functioneren.

Het bekkenframe is voorzien van een veiligheids-sluiting. Om de zwenkarm van het bekkenframe te openen, drukt u gelijktijdig op de beide knoppen (D+E). Nu kunt u de zwenkarm van het bekkenframe openen. Voor het sluiten plaatst u het slot op de borgpennen en schuift hem stevig naar voren. Bij het sluiten drukt u het bekkenframe stevig naar achteren. De vergrendeling moet hoorbaar vastklikken en de borgpennen dienen door het slot te zijn afgedekt.

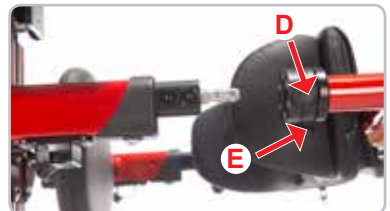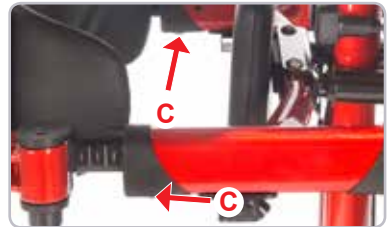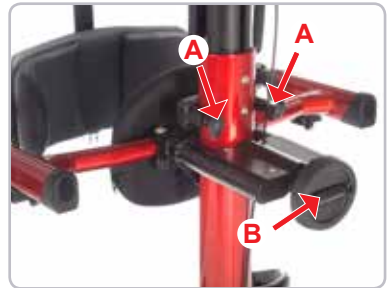

**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**


### 3.9 Gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken

De gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken kan in hoogte, breedte en diepte worden versteld. De hoogte en diepte van de gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken kan eerst als geheel via het bekkenframe worden ingesteld (zie punt 3.8).

Daarnaast kan de hoogte worden ingesteld, door de schroef (A) los te draaien. Breng de gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken nu in de gewenste positie.

Om de breedte in te stellen, draait u de schroef (B) los en brengt u de gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken op de gewenste breedte.

Om de diepte in te stellen, trekt u de bekleding van de steun en draait u de schroeven (C) los. Breng de gecombineerde steun voor wervelkolom en bekken nu op de gewenste diepte.

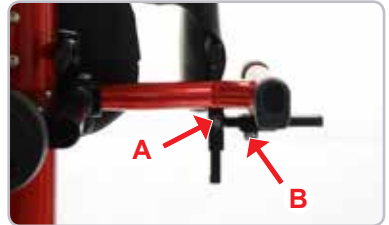


**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**

### 3.10 Bilsteun

De hoogte en de diepte van de bilsteun kunnen in zijn geheel via het bekkenframe worden ingesteld (zie punt 3.8).



Bovendien kan de bilsteun op drie verschillende hoogte aan het bekkenframe worden gemonteerd. Draai daartoe de schroeven (A) aan de achterkant van het bekkenframe los. Nu kunt u de bilsteun op de bovenste, de middelste of de onderste hoogtepositie (B) plaatsen.

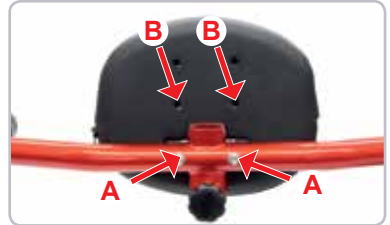

### 3.11 Buik-bekkensteun

De buik-bekkensteun kan in diepte en hoogte versteld worden. De diepte- en hoogte-instellingen worden via het complete bekkenframe uitgevoerd (zie punt 3.8)

Daarnaast kan de buik-bekkensteun in drie hoogteposities worden gemonteerd. Draai daartoe het bekkenframe met de spindel tot de maximale diepte uit (zie punt 3.3). Nu kunt u de schroeven (C) losdraaien. Breng de buik-bekkensteun nu in de bovenste (D), de middelste (E), of de onderste (F) hoogtepositie aan.

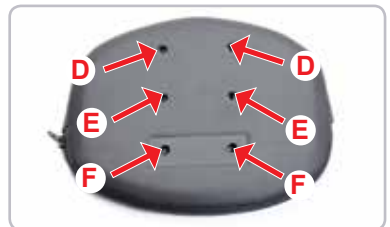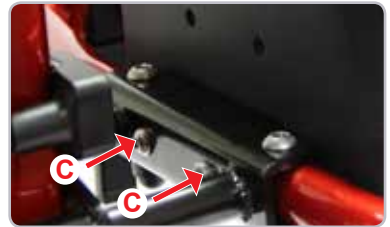

**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**



### 3.12 Borststeun met romp ondersteuning

De borststeun met rompondersteuning is in de breedte en hoogte instelbaar en optioneel bovendien in hoek verstelbaar.



De hoogte kan o.a. via de hoogteverstelling aan de middelste kolom (zie punt 3.2) ingesteld worden.

Het frame van de borststeun kan in zijn geheel via de knevel in hoogte worden ingesteld. Maak knevel (B) los en breng het frame met de borststeun in de gewenste positie.

Voor de instelling van de hoogte aan de borststeun zelf, draait u de vier inbusschroeven (C) los en brengt u de borststeun in de gewenste positie.

Voor het instellen van de breedte en hoek trekt u de bekleding van de borststeun, draait de vier inbusschroeven (A) los en brengt u de romp ondersteuning in de gewenste positie.

Om de hoek-verstelbare borststeun in de hoek te verstellen, draait u de inbusschroeven (D) los en brengt u de borststeun in de gewenste positie.

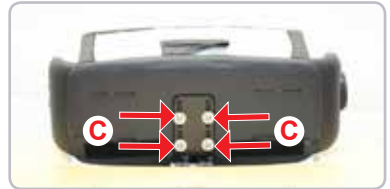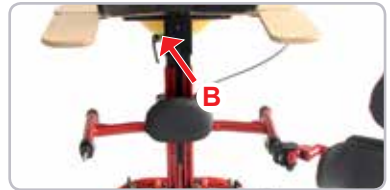

### 3.13 Rugband

De rugband is gemonteerd aan de borststeun met rompondersteuning.

De band kan geopend of gesloten worden via een steekslot (E). Via de bandgeleiding kan de band in de lengte worden gereguleerd.

Instellingen van hoogte en diepte kunnen via de borststeun met rompondersteuning worden uitgevoerd (zie 3.10)



**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**

### 3.14 Rugsteun

De hoogte en de diepte van de rugsteun kunnen in zijn geheel via het bekkenframe worden ingesteld (zie punt 3.8).

De rugsteun (A) zelf is bovendien in hoogte instelbaar, wordt aan de zwenkarm van het bekkenframe gemonteerd en kan hierdoor naar de kant uitzwenken.

Voor het instellen van de hoogte maakt u de draaggreep (B) aan de achterkant van de rugsteun los en brengt deze in de gewenste positie.

De rugsteun is van een veiligheidssnapslot (C) voorzien. Om de rugsteun te monteren of te demonteren, trekt u de snapper (C) naar u toe. Nu kunt u de rugsteun verwijderen of monteren, door de rugsteun uit de opname te verwijderen of deze erin te plaatsen. Na de montage draait u de snapper (C) vast, om de rugsteun vast te zetten.



### 3.15 Hoofdsteun

De hoofdsteun is in hoogte, diepte en hoek verstelbaar en alleen te gebruiken in combinatie met de rugsteun.

De hoogte kan via de rugsteun worden versteld (zie punt 3.14) of via de hoogteverstelling van het bekkenframe (zie punt 3.8).

Voor het apart instellen van de hoogte van de hoofdsteun draait u de schroef (E) aan de achterkant van de rugsteun los en brengt u de hoofdsteun in de gewenste positie.

Om de diepte en/of de hoek in te stellen, draait u de schroeven (D) los.



**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**

### 3.16 Werkblad

Er zijn in totaal vier werkbladen verkrijgbaar: een variant zonder speelkom en armsteunen, een variant met speelkom, een variant met armsteunen en een variant met speelkom en armsteunen. Het werkblad is in diepte, hoogte en in hoek verstelbaar.



De hoogteverstelling van het werkblad wordt uitgevoerd via de telescopische middelste kolom (zie punt 3.2).



Voor verstelling van de diepte draait u de schroeven (A) onder het werkblad los en brengt u die binnen de langsgaten in de gewenste positie.

De hoek van het werkblad kan met behulp van de steunstrip worden ingesteld. Draai daarvoor de vleugelschroeven (B) los en breng het werkblad in de gewenste positie.



**Hou het werkblad daarbij goed vast, omdat hij anders door zijn eigen gewicht met kracht in de buis glijdt!**

#### 3.16.1 Werkblad met speelkom

Er zijn optioneel twee werkbladen met een speelkom verkrijgbaar.

Om gebruik te kunnen maken van de speelkom (C), steekt u een vinger in de opening (D) van de afdekking en verwijdert deze. Als de verdieping niet meer nodig is, legt u de afdekking weer terug.



**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**

### 3.16.2 Verstelbare armsteunen

Er zijn twee varianten van het werkblad met verstelbare armsteunen verkrijgbaar.

De verstelbare armsteunen voor het werkblad zijn in breedte verstelbaar.




Om de breedte in te stellen, draait u de zes schroeven (A) aan de onderkant van het werkblad los en brengt u de verstelbare armsteunen in de gewenste positie.



### 3.17 Kinsteun

De kinsteun wordt aan de borststeun gemonteerd en kan via de hoogteverstelling van de borststeun worden versteld (zie punt 3.12)

De kinsteun zelf kan ook in hoogte worden versteld. Om de hoogte te verstellen, trekt u de bekleding van de borststeun naar boven en draait u de schroeven (B) in de langsgaten los. Breng de kinsteun nu in de gewenste positie.

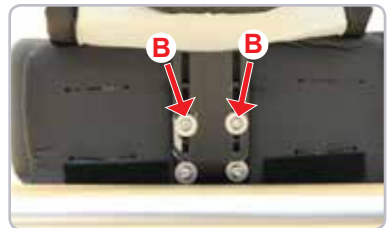

**Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!**

## **4. Onderhoud en reinigen**

### **4.1 Reinigen**

Alle elementen van het frame alsmede de oppervlakken kunnen met een spons of vochtige doek in combinatie met antibacteriële huishoudelijke reinigingsmiddelen gereinigd worden. De bekleding is afneembaar en kan op 30° C worden gewassen in de wasmachine.

Neem in dit geval ook onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Dezen vindt u op [www.schuchmann-reha.de/Ernie 2](http://www.schuchmann-reha.de/Ernie 2)

### **4.2 Onderhoud**

Gelieve een dagelijkse zichtcontrole uit te voeren en controleer de ventrale stavoorziening regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende delen en storingen. Gelieve u bij een defect of een foutieve functie direct tot de uitleverende dealer (zie 7.5) te wenden.

### **4.3 Reserveonderdelen**

Voor een bestelling van reserveonderdelen wendt u zich tot de uitleverende dealer met vermelding van het serienummer van de stavoorziening (zie 7.5).

De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.


### **4.4 Gebruiksduur en hergebruik**

De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode noch gebruikt worden, als het nog in een veilige toestand verkeert. De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals bekleding, wielen, .....

Het onderhoud en de beoordeling van de toestand en in voorkomende gevallen het hergebruik is voor de verantwoordelijkheid van de dealer.

De ventrale stavoorziening is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u hem doorgeeft de onder hoofdstuk 4. genoemde reinigings- en desinfectieaanwijzingen uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden de ventrale stavoorziening in te stellen op zijn meest compacte maten.

## 5. Technische gegevens

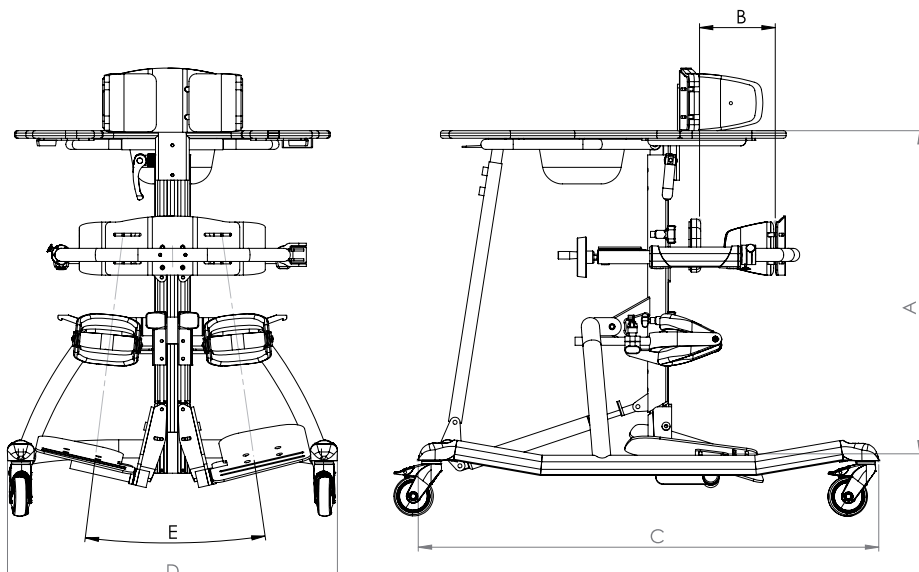Maten - Basismodel				
				
		Ernie 2 Mt. 1	Ernie 2 Mt. 2	Ernie 2 Mt. 3
	Lichaamslengte	75 - 110 cm	95 - 150 cm	130 - 170 cm
a	Werkblad hoogte vanaf voetplaat	50 - 75 cm	65 - 95 cm	85 - 120 cm
B	Bekkendiepte	13 - 25 cm	13 - 25 cm	16 - 31 cm
	Diepte spindel verstelling	6 cm	6 cm	6 cm
C	Totale lengte	84 cm	90 cm	100 cm
D	Totale breedte	57 cm	65 cm	71 cm
E	Abductie gedeelde voetsteunen	0° - 27°	0° - 27°	0° - 27°
	Max. belasting	40 kg	60 kg	80 kg

## 6. Garantie

Bij alle producten geldt de tweejarige wettelijke garantietermijn. Deze begint met de aflevering van de producten. Wanneer in deze periode aan het door ons geleverde product aantoonbaar materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij bij terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.

## 7. Identificatie

### 7.1 EG-conformiteitsverklaring

**Firma**                    **Schuchmann GmbH & Co.KG**  
Dütestr. 3  
D-49205 Hasbergen  
Tel.: +49 (0)54 05 / 909 - 0  
Fax: +49 (0)54 05 / 909 - 109



**verklaart in enige verantwoordelijkheid, dat het onderstaand genoemde product van productklasse 1**

**„Ernie 2“ - ventrale stavoorziening**

Art.-Nr.: 48 01 000 (Mt. 1)    48 02 000 (Mt. 2)    48 03 000 (Mt. 3)

**met de gebruikelijke bepalingen van de onderstaand aangehaalde richtlijnen en standards overeenstemt:**

- EG richtlijn 93/42/EEG over medische producten van 14 juni 1993
- DIN EN 12182    Technische hulpmiddelen voor gehandicapte mensen
- EN ISO 14971    Medische producten - Toepassing van het risicomanagement op medische producten

**Deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor producten met bovengenoemde artikelnummers en is geldig tot 31-12-2017.**

**Datum**                    20-01-2016


**Handtekening**          
\_\_\_\_\_

**Naam**                    Torsten Schuchmann

**Functie**                    Veiligheidsfunctionaris voor medische producten

## 7.2 Serienummer / Productiedatum

Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (A).

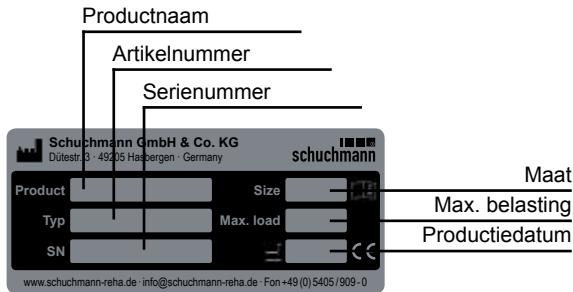

## 7.3 Productversie

De ventrale stavoorziening Ernie 2 is verkrijgbaar in drie maten en kan met verscheidene accessoires worden uitgebreid (zie punt 2.6).

## 7.4 Uitgave van het document

Gebruiksaanwijzing Ernie 2 - wijzigingsstand A; Uitgave 01.2016

## 7.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer

Dit product werd geproduceerd door:



### Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen

Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109

info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Dit product werd door de volgende dealer uitgeleverd:

