

Bello 2 mini

de therapiestoel voor de eerste hulp





Geachte cliënte, geachte cliënt,

Wij willen u hier hartelijk danken voor het betoonde vertrouwen en de aanschaf van ons product.

Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Gelieve er rekening mee te houden dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing omwille van de uitrusting van uw product kunnen afwijken.

Technische wijzigingen behouden wij ons voor.

Belangrijke informatie!

Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw Schuchmann team

Inhoud

1. Voorbereiding van de therapiestoel voor het gebruik	4
1.1 Uitlevering.....	4
1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik.....	4
1.3 Veilig verwijderen.....	4
1.3.1 Verpakking.....	4
1.3.2 Product.....	4
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing.....	4
2. Productbeschrijving.....	5
2.1 Materiaalinformatie.....	5
2.2 Handling/transport.....	5
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften.....	5
2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwinginstructies.....	6
2.5 Uitrusting basismodel.....	6
2.6 Lijst met toebehoren.....	7
2.7 Productoverzicht.....	7
3. Instellingen.....	8
3.1 Zithoogte.....	8
3.2 Zithoek.....	9
3.3 Zitdiepte.....	9
3.4 Rughoek.....	9
3.5 Rughoogte.....	10
3.6 Rug met geïntegreerde bovenarmgeleiding.....	10
3.7 ArMLEUNINGEN.....	10
3.8 Voetenbank.....	11
3.9 Looprollen.....	11
4. Toebehoren.....	12
4.1 Hoofdsteun.....	12
4.2 Borstkassteunen bij de standaard rug.....	12
4.3 Borstkassteunen bij rug met geïntegreerde bovenarmgeleiding.....	13
4.4 Dijgeleiding.....	14
4.5 Dysplasie-stoel.....	15
4.6 Binnenbeengeleiding.....	15
4.7 Therapietafel.....	16
5. Onderhoud en reinigen.....	17
5.1 Reinigen.....	17
5.2 Onderhoud.....	17
5.3 Reserveonderdelen.....	17
5.4 Gebruiksduur en hergebruik.....	17
6. Technische gegevens.....	18
7. Garantie.....	18
8. Identificatie.....	19
8.1 EG-conformiteitsverklaring.....	19
8.2 Serienummer/productiedatum.....	20
8.3 Productversie.....	20
8.4 Uitgifte van het document.....	20
8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende leverancier.....	20

1. Voorbereiding van de therapiestoel voor het gebruik

1.1 Uitlevering

Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid, onjuistheden te controleren en let op eventuele transportschade.

Controleer het product in aanwezigheid van de overbrenger

Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Gelieve een schriftelijke reclamatie naar de bevoegde vakhandelaar te sturen.

1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik

Het correcte gebruik van de therapiestoel vergt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en in acht te nemen, voor de eerste ingebruikname van de therapiestoel.

Stoffering, met name arMLEUNINGEN kunnen door zonlicht ontoelaatbaar verhit raken. Dek deze plaatsen af of bescherm het apparaat tegen zonlicht.

1.3 Veilig verwijderen

Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuvcontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsaanwijzingen in de punten 1.3.1 en 1.3.2 in acht te nemen.

1.3.1 Verpakking

De verpakking van het product dient voor een eventueel later noodzakelijk transport bewaard te worden. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk, het originele verpakingskarton te gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is.

Breng de verpakingsmaterialen per soort naar de recycling. Laat de verpakingsmaterialen niet zonder toezicht, omdat zij mogelijke gevarenbronnen zijn.

1.3.2 Product

Voer de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling. (zie materiaal informatie onder 2.1)

1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze in geval van een mogelijk hergebruik bij het product blijft.

2. Productbeschrijving

2.1 Materiaalinformatie

Het basisframe alsook de afzonderlijke elementen zijn van staal of aluminium vervaardigd, corrosievrij en met poeder gecoat. De bekleding bestaat voor 100% uit polyester en is brandvertragend (volgens DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handling/transport

De therapiestoel is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van zwenkwie- len is voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen vastgezet zijn. Ga vervolgens naast de therapiestoel staan, pak deze voor en achter onder het zitgedeelte vast en draag hem naar de gewenste plaats.

Voor het transporteren van de therapiestoel, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (voetenbank opklappen, zithoogte in de laagste stand, etc.).



Zet alle beweegbare onderdelen voor het dragen vast!



Het kind mag zich tijdens het transport niet in de therapiestoel bevinden!

2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

De therapiestoel Bello 2 mini is ontworpen voor kinderen, die niet vrij kunnen zitten of staan, maar waarvan de beperkte romphouding een zitten in een zitschaal niet permanent vereist.

Bello 2 mini is een veelzijdige therapiestoel voor gebruik in huis, of in het kinderbedje/op de kleuterschool en voor de eerste hulp. Individueel instelbare zitmaten en ondersteunende steunen zorgen voor een stabiele en rechte zithouding.

2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwinginstructies



LET OP!

- Let er op, dat de therapiestoel slechts door één kind/jongere gebruikt wordt.
- Gebruik de therapiestoel alleen op effen en stabiele ondergrond.
- Gebruik de therapiestoel niet voor transport van personen.
- Om een veilig aanheffen bij het transport van de therapiestoel te verzekeren, staat u zijdelings naast de therapiestoel en neemt u hem vooraan en achteraan vast met het zitvlak. Daarbij moeten alle beweegbare delen geblokkeerd zijn.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in de therapiestoel zitten.
- Het correcte gebruik van de therapiestoel vergt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon.
- De maximum belasting (zie punt 6) mag niet overschreden worden.
- Gebruik de therapiestoel niet met defecte, versleten of ontbrekende delen.
- Omwille van de brandveiligheid mag de therapiestoel niet in de omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron, zoals elektrische of gasverwarming, geplaatst worden.
- Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van het kind in gevaar brengt.
- Gebruik de therapiestoel alleen, als alle componenten correct aangebracht en ingesteld zijn.
- Er dient op gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.
- Gebruikers met een gezichts- of leesprobleem moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen om veilig met de therapiestoel om te kunnen gaan.

2.5 Uitrusting basismodel

- incl. armleuningen, voetenbank met bekleding, ergonomisch gevormde schuifgreep, standaard zitkussen met hoes, 4 looprollen (75 mm) waarvan 2 met vastzetter
- Zithoogte instelbaar met gasdrukveerondersteuning (800 N)
- Framekleur: telegrijs 4 (wit-grijs)
- Instelmogelijkheden: zithoek (per gasdrukveer 250N), rughoek, zitdiepte en zitbreedte, in hoek, hoogte en breedte regelbare armleuningen, in hoogte regelbare rugleuning, kniehoek- en hoogteverstelbare voetenbank

2.6 Lijst met toebehoren

- Standaard rug-unit
- Rug met geïntegreerde bovenarmgeleiding
- Borstkassteunen, lang (rompgeleiding)
- Borstkassteunen
- Dijgeleiding
- Binnenbeengeleiding
- Dysplasie-stoel
- Incontinentielaag
- Hoofdsteen
- Houten therapietafel
- Tafelpad-kussen
- Slabbetje
- Gordelmontageset voor het zitbereik
- Gordelmontageset voor het rugbereik
- Zitbroek T-vorm
- Bekkengordel

2.7 Productoverzicht

De onderstaande afbeelding dient u de benaming van de belangrijkste componenten aan te tonen, alsook de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing terugvindt.




3. Instellingen

Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur medische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

3.1 Zithoogte

De zithoogte wordt met behulp van een gasdrukveer geregeld. Om de zithoogte naar boven te verstellen, wordt het voetpedaal (A) aan het basisframe bediend. Door licht te drukken glijdt de zitunit naar boven. Het neerdalen wordt door druk langs boven op het zitvlak bij gelijktijdige bediening van het voetpedaal bereikt. De gasdrukveer dient slechts als ondersteuning van de hoogteregeling.

Het voetpedaal kan met trekspanstift (B) (te vinden op de binnenkant van het voetpedaal) tegen ongewilde bediening geborgd worden. Verdraai daarvoor de trekspanstift tot hij vastklikt. Ondersteunt u eventueel het vastklikken door lichte beweging van het voetpedaal. De vergrendeling wordt ontgrendeld door de trekspanstift uit te trekken en een kwartdraai te verdraaien.

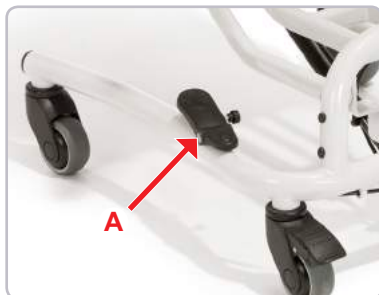

Let er op, dat er gedurende het instellen / regelen van de zithoogte geen lichaamsdelen (voeten) in het bereik van het instel- / regelmechanisme (tussen vloer en voetensteun van de therapiestoel) terechtkomen, om mogelijke letsels te vermijden

3.2 Zithoek

De steelknop (A) voor de zithoekregeling is op de schuifbeugel gemonteerd. De zithoekregeling kunt u eenvoudig met steelknop (A) bedienen.



3.3 Zitdiepte

Voor het instellen van de zitdiepte draait u de twee vleugelmoeren (B) onder de zitunit los. Daarna kan het zitvlak traploos naar voren en achteren worden verschoven.



Schroef na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!

3.4 Rughoek

De rug kan na het losmaken van stergreep (C) op de rechterkant van de zitunit in hoek worden geregeld.



Let er op, dat bij het regelen / instellen van de rugneiging geen lichaamsdelen in het bereik van het instel- / regelmechanisme terechtkomen, om mogelijke letsels te vermijden.

3.5 Rughoogte

Draai de schroeven (A) aan de achterkant van de therapiestoel los en breng de rug in de gewenste hoogte.



3.6 Rug met geïntegreerde bovenarmgeleiding

De rug met geïntegreerde bovenarmgeleiding is standaard voorzien van kussen, hoes en kleine kussenwигgen (ca. 3 cm). Met de kussenwигgen kan in het lagere rompgedeelte een komvorm worden verkregen voor de best mogelijke positionering van de romp. Om de komvorm te veranderen, maakt u het kussen van de rug los en opent u de ritssluiting aan de achterkant. Breng nu de kussenwигgen in de gewenste positie, sluit de ritssluiting en plaats de kussen weer terug op de rug.




3.7 Armleuningen


De armleuningen zijn in de hoek, in lengte en in breedte regelbaar.

De hoekregeling gebeurt na het losschroeven van de

Stergreep (B). Door losdraaien van stergreep (C) kan de hoogte worden ingesteld.

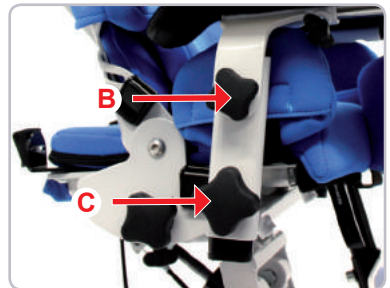

De breedteregeling gebeurt na het losdraaien van beide draadpennen (D), die zich op de onderzijde van de zitunit bevinden.


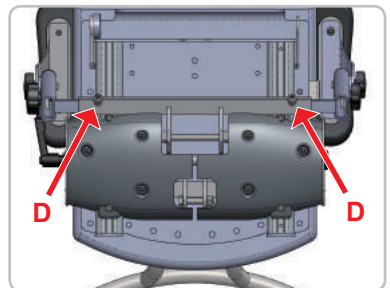


Schroef na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!

3.8 Voetenbank

De voetenbank is in de hoogte en kniehoek verstelbaar. Draai de schroeven (A) los, om de hoogte in te stellen en breng de voetenbank in de gewenste positie.

Om de kniehoek in te stellen, draait u de snelspanner (B) onder de zit-unit los. Breng de kniehoek van de voetenbank nu in de gewenste positie

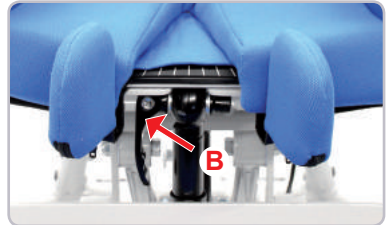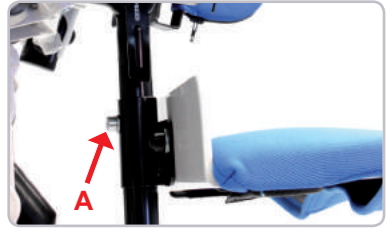

Schroef na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!

3.9 Wielen

De therapiestoel dient principieel door afremmen van de 2 achterste looprollen geblokkeerd te worden, om een ongewild weggrollen te vermijden. Druk daarvoor met de punt van de voet de remmen (C) naar beneden.



De rem dient alleen voor het voorkomen van ongewild weggrollen op effen vlakken!




4. Toebehoren

4.1 Hoofdsteun

De hoofdsteun is in twee varianten verkrijgbaar. Om de hoogte van de eerste variant te verstellen, draait u de beide cilinderkopschroeven met inbussleutel (A) los en brengt de hoofdsteun in de gewenste positie.

Om de tweede variant in hoogte, diepte en hoek te verstellen, draait u de schroeven (B) los en brengt de hoofdsteun in de gewenste positie.

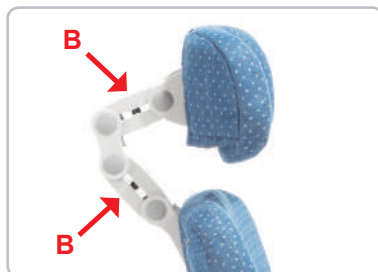


4.2 Borstkassteunen bij de standaard rug

De borstkassteunen zijn in een normale en lange variant (met rompgeleiding) verkrijgbaar. Beide varianten zijn individueel in hoogte en breedte instelbaar.

Trek de kussenhoes van de achterkant van de rug eraf en draai de beide cilinderkopschroeven met inbussleutel (C) los. Breng de borstkassteun in de gewenste positie en draai de schroeven weer vast.

Bevestig vervolgens de kussenhoes weer op de achterkant van de rug.

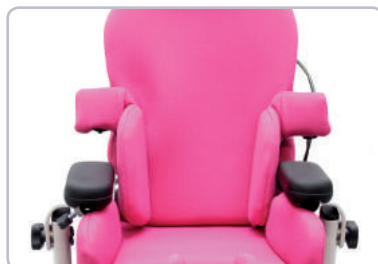


4.3 Borstkassteunen bij de rug met geïntegreerde bovenarmgeleiding

De borstkassteunen zijn in een normale en lange variant (met rompgeleiding) verkrijgbaar. Beide varianten zijn individueel in hoogte en breedte instelbaar.

Hoogte-instelling

Open de ritssluiting aan de voorkant van het rugkussen en trek de kussenhoes van de achterkant van de rug eraf. Draai vervolgens de beide cilinderkopschroeven met inbussleutel (A) los en breng de borstkassteun in de gewenste hoogte. Draai de schroeven weer vast en bevestig de kussenhoes weer aan de achterkant van de rug en sluit de ritssluiting.

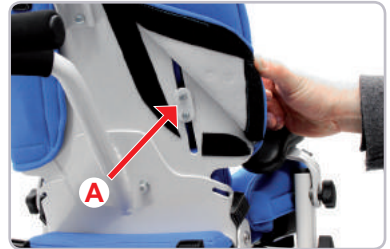

Breedte-instelling

Trek de stof aan de voorkant van de borstkassteun opzij. Draai de daaronder liggende schroeven (B) en breng de borstkassteunen in de gewenste breedte. Draai de schroeven weer vast en bedek de schroeven weer met de stof van de hoes.




4.4 Dijgeleiding

De kussens van de dijgeleiding zijn individueel in te stellen in breedte, diepte en hoek.

Voor het instellen van de breedte, de diepte en de hoek draait u de cilinderkopschroef onder het zitvlak met inbusleutel (A) los en brengt u de dijbeengeleiding in de gewenste positie.



Voor een extra diepte-instelling opent u de klittenbandsluiting (B) en draait u de 2 lensschroeven met inbusleutel (C) los. Breng het kussen in de gewenste positie en draai de schroeven weer vast. Sluit de klittenbandsluiting weer.

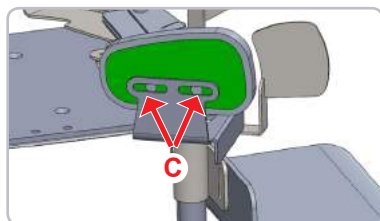


Schroef na iedere instelling de schroefverbindingen weer vast!

4.5 Dysplasie-stoel

De dysplasie-stoel maakt een eventueel medisch vereiste abductie van de dijen mogelijk. Voor het instellen van de beengeleidingen draait u de cilinderkopschroeven met inbussleutel (A) aan de onderkant van de zitplaat los. Hierdoor gaat de lamellenklem los en kunnen de binnen- en buitenbeengeleidingen in de hoek worden verschoven. Voor een gelijke hoekinstelling van de benen is op de bovenste klemplaat een hoekschaal (B) van 0° tot 30° per kant geplaatst.

Verschuif de beengeleiding in de gewenste positie. Met de weerstand van de lamellenklem kan een visuele controle van de instelling worden uitgevoerd, ook in losse toestand. Draai vervolgens de schroeven weer vast.

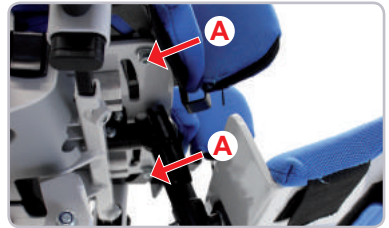


4.6 Binnenbeengeleiding

Voor het instellen van de beengeleidingen draait u de cilinderkopschroeven met inbussleutel (C) aan de onderkant van de zitplaat los. Hierdoor gaat de lamellenklem los en kan de binnenbeengeleiding in de hoek worden verschoven.

Voor een gelijke hoekinstelling van de benen is op de bovenste klemplaat een hoekschaal van 0° tot 30° per kant geplaatst.

Verschuif de beengeleiding in de gewenste positie. Met de weerstand van de lamellenklem kan een visuele controle van de instelling worden uitgevoerd, ook in losse toestand. Draai vervolgens de schroeven weer vast.

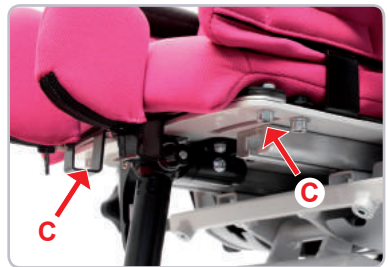



Schroef na iedere instelling de schroefverbindingen weer vast!

4.7 Therapietafel

De therapietafel wordt van voren in de tafelhouder (A) op de therapiestoel gestoken en is in de diepte en hoogte instelbaar.

Voor bevestiging van de therapietafel draait u de vleugelschroeven (B) vast. Voor het instellen van de diepte, draait u de vleugelschroeven weer los en brengt u de tafel in de gewenste positie. Hierbij dient erop gelet te worden, dat de diepteverstelbuois (C) tot aan het eind in de tafelhouder van de arMLEuningdrager is geschoven.

De hoogteregeling gebeurt met behulp van de regeling van de arMLEuning (zie punt 3.7).

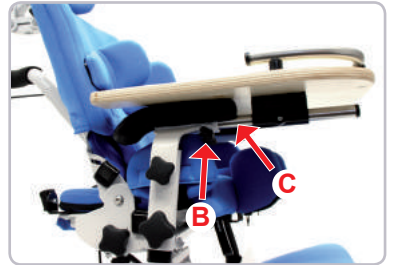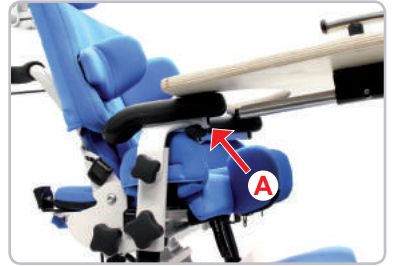

Schroef na iedere instelling de schroefverbindingen weer vast!

5. Onderhoud en reinigen

5.1 Reinigen

Gelieve alle frame-elementen met een spons of een vochtige doek te reinigen. De hoezen zijn afneembaar en kunnen bij 30° in de wasmachine gewassen worden. Gelieve de hoezen niet in de droogkast te drogen en geen bijtende poetsmiddelen of dergelijke te gebruiken. Neem in dit geval ook onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Die vindt u op www.schuchmann.de/mediathek.

5.2 Onderhoud

Gelieve een dagelijkse zichtcontrole uit te voeren en controleer de therapiestoel regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende delen en foutieve functies. Gelieve u bij een defect of een foutieve functie direct aan de uitleverende vakhandelaar (zie 8.5) te wenden.

5.3 Reserveonderdelen

Gelieve u voor een bestelling van reserveonderdelen met opgave van het serienummer van de therapiestoel aan de uitleverende vakhandelaar te wenden (zie 8.5). De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.

5.4 Gebruiksduur en hergebruik

De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode noch gebruikt worden, als het nog in een veilige toestand verkeert. De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals bekleding, wielen, batterijen

Het onderhoud en de beoordeling van de toestand en in voorkomende gevallen het hergebruik is voor de verantwoordelijkheid van de leverancier.

De therapiestoel is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u hem doorgeeft de onder hoofdstuk 5. genoemde reinigings- en desinfectie-aanwijzingen uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen op zijn meest compacte maten, om ruimte te besparen.

6. Technische gegevens

Maten - Basismodel		
Bello 2 mini		
a	Zitdiepte	12 - 19 cm
B	Zitbreedte	14 - 22 cm
C	Rughoogte met korte rug	28 - 33 cm
C	Rughoogte met lange rug	30 - 35 cm
D	Zithoogte	25 - 62 cm
E	Onderbeenlengte	12 - 22 cm
F	Totale breedte	52 cm
G	Lengte basisframe	58 cm
	Zithoek	(-)5° - 37° / 0° - 42°
	Rughoek	(-)5° - 25°
	Max. belasting	20 kg
	Gewicht	16 kg

7. Garantie

Bij alle producten geldt de tweejarige wettelijke garantietermijn. Deze begint met de aflevering of de overgave van de producten. Wanneer in deze periode aan het door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.

8. Identificatie

8.1 EG-conformiteitsverklaring

Firma Schuchmann GmbH & Co.KG
Dütestr. 3
D-49205 Hasbergen
Tel.: +49 (0)54 05 / 909 - 0
Fax: +49 (0)54 05 / 909 - 109



verklaart in enige verantwoordelijkheid, dat het onderstaand genoemde product van productklasse 1

"Bello 2 mini "- de therapiestoel voor de eerste hulp

Art.nr.: 31 00 000

met de gebruikelijke bepalingen van de onderstaand aangehaalde richtlijnen en standaards overeenstemt:

- EG richtlijn 93/42/EEG over medische producten van 14 juni 1993
- DIN EN 12182 Technische hulpmiddelen voor gehandicapte mensen
- EN ISO 14971 Medische producten - Toepassing van het risicomangement op medische producten

Deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor producten met bovengenoemde artikelnummers en is geldig tot 31-12-2019.

Datum 16-1-2017

Handtekening





Naam Torsten Schuchmann

Functie Veiligheidsfunctionaris voor medische producten

8.2 Serienummer / Productiedatum

Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt. (A)

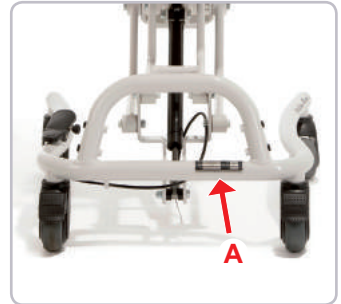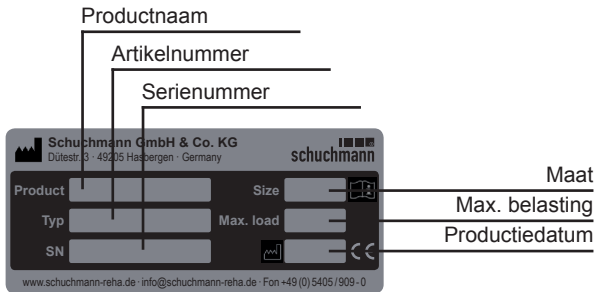

8.3 Productversie

De therapiestoel Bello 2 mini is verkrijgbaar in één maat en kan met heel veel toebehoren uitgebreid worden (zie punt 2.6).

8.4 Uitgave van het document

Gebruiksaanwijzing Bello 2 mini - wijzigingsstand A; Uitgave 03.2017

8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende leverancier

Dit product werd geproduceerd door:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen

Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109

info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Dit product werd door de volgende leverancier uitgeleverd: