




Een stoel  
hélemaal voor  
mij alleen!

Eet- en  
werkstoel voor  
jongvolwassenen



## MADITA MAXI

De Madita Maxi is een stevige stoel met extra ondersteuning, waardoor jongvolwassenen goed aan dagelijkse activiteiten kunnen deelnemen. Door de stevige kolom en het kantelsysteem is de stoel geschikt voor zowel actieve als meer ondersteuning behoevende jongeren. De kanteling is traploos verstelbaar door middel van een voetpedaal.

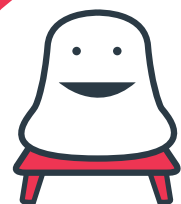

# MADITA MAXI



Een goede zithouding is belangrijk. De juiste zithouding heeft een positieve invloed op de groei-ontwikkeling van kinderen en kan invloed hebben op gedrag. Iedereen is uniek, dus iedere stoel moet ook uniek zijn.

Een goede stoel is daarom aangepast aan de gebruiker en niet andersom.

## Madita Maxi

De Madita Maxi is een stevige stoel met extra ondersteuning, waardoor jongvolwassenen goed aan dagelijkse activiteiten kunnen deelnemen. Door de stevige kolom en het kantelsysteem is de Madita Maxi geschikt voor zowel actieve als meer ondersteuning behoevende jongeren.

De stoel is in zithoogte en -diepte verstelbaar. De zithoogte is in te stellen door middel van een spindel aan de onderzijde van het frame. De rugleuning is in hoek verstelbaar.

De Madita Maxi is standaard uitgevoerd in stoffen bekleding.

## Kantelverstelling

De Madita Maxi is instelbaar met een lichte voorwaartse kanteling, waardoor activering van de rugspieren wordt bevorderd. Tijdens ontspannings- of eetmomenten kan de stoel achterwaarts worden gekanteld, waardoor er een passievere zithouding wordt gecreëerd. De kanteling is traploos verstelbaar door middel van een voetpedaal.

## Voetenplank

De Madita Maxi is uitvoerbaar met een vaste of een verstelbare voetenplank. De vaste voetenplank is zonder gereedschap eenvoudig weg te nemen.

De verstelbare voetenplank is in hoogte en kniehoek verstelbaar en beweegt mee tijdens het kantelen van de stoel. De voetenplank is opklapbaar om een gemakkelijke transfer mogelijk te maken.

## Instellen

Voor het creëren van een optimale zithouding, kan de belanghebbende tijdens het instellen in de stoel blijven zitten. Dit voorkomt het meerdere malen opstaan of uit de stoel tillen. Zo zie je direct of de stoel juist is ingesteld.

## De Madita Maxi is standaard voorzien van:

- spindel hoogteverstelling
- gasveer kantelverstelling
- anatomisch gevormd zitkussen
- zitbreedteverstelling
- armsteunen in hoek verstelbaar
- 4 zwenkwielen
- duwbeugel
- bekleding uitgevoerd in stof

## Opties:

- hoofdsteen
- abductieklos
- rompelotten
- dijbeenondersteuning
- houten voetenplank
- werkblad
- diverse rugleuningen
- fixatiemateriaal
- afwasbare flexi bekleding



## TECHNISCHE GEGEVENS

### Madita Maxi

Geschikt voor lichaamslengte	140 - 175 cm
Maximale belasting	120 kg
Zitbreedte	34 - 44 cm
Zitdiepte	36 - 47 cm
Zithoogte	48 - 60 cm
Zithoek	-5° / +30°
Afmetingen frame (L x B)	80 x 64 cm
Kleur frame	Antraciet
Kleur bekleding	Zwart / grijs of zwart / blauw